



Cama de Hospital Eléctrica

P | **POLYMEDIC**
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Con la Cama de Hospital Eléctrica, el usuario y sus cuidadores tendrán toda la comodidad y funcionalidad de una cama de hospital en su propia casa. El mecanismo eléctrico multi-posiciones funciona mediante un control de mando de fácil operación.

6 Funciones

- Sección de espalda o fowler con auto contorno

Permite ajustar el ángulo del respaldo de la cama, facilitando la colocación del paciente en posiciones sentadas.

- Posición vascular o elevación de pies

Permite posicionar adecuadamente las extremidades inferiores.

- Posición elevación de espalda y pies

Permite una postura semi-sentada, de forma más cómoda y funcional.

- Posición de Trendelenburg/ Trendelenburg invertido

Permite inclinar la superficie completa de la cama, colocando la cabeza del paciente a un nivel superior o inferior según la posición seleccionada.

- Altura y descenso ajustable


La elevación de la altura total de la superficie de la cama permite adaptar su nivel según las necesidades clínicas y operativas.

- Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP)

Permite colocar la cama de manera inmediata en posiciones completamente horizontal y estable.



Solicita tu cotización

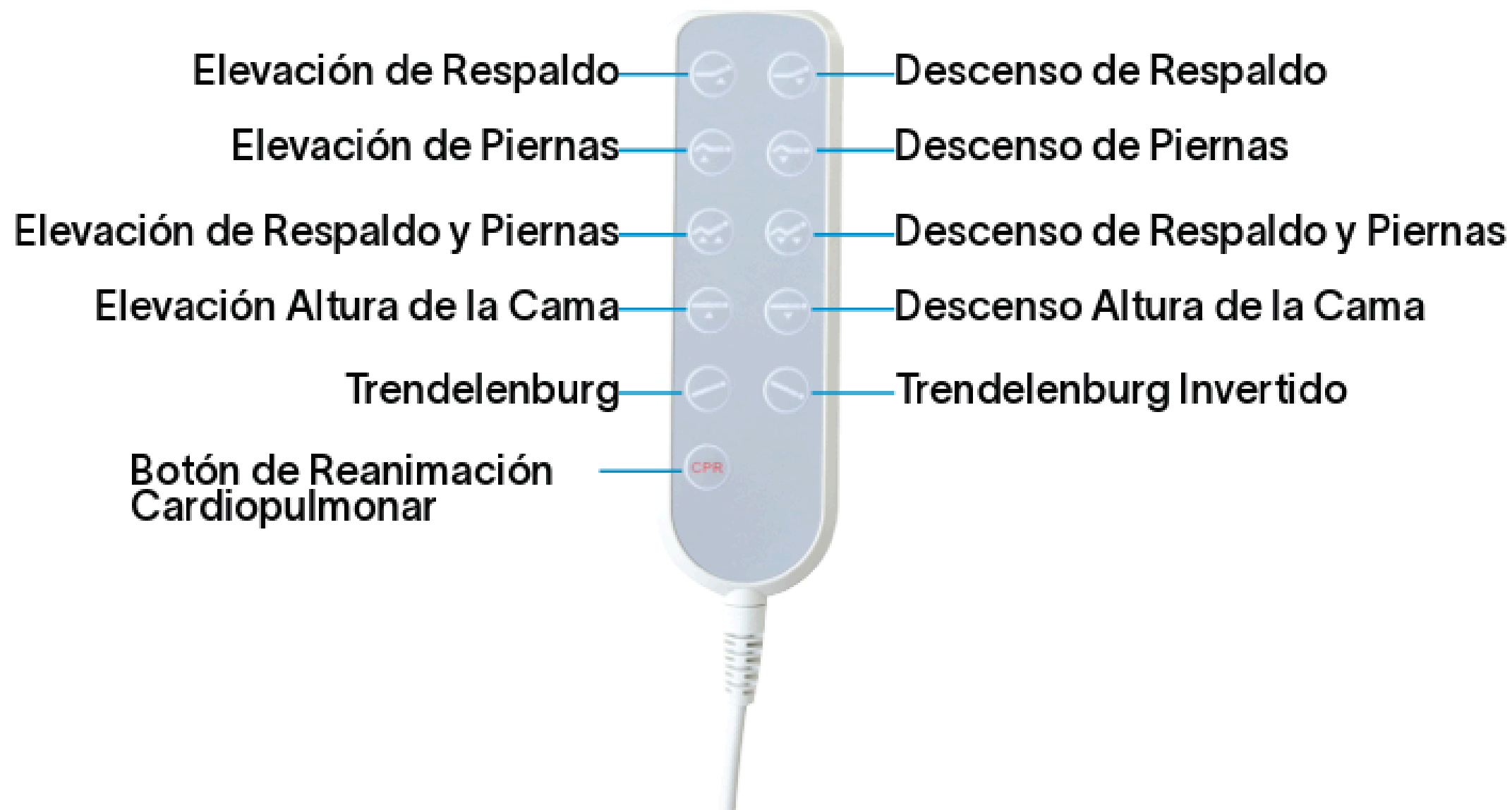

Usos Adecuados

1. Los cables deben mantenerse enrollados.
2. Los seguros de la cabecera y piecera se deben encontrar firmes y seguros.
3. El portasueros debe colocarse antes de colocar el colchón.
4. Baje los barandales cuidadosamente para que no se maltraten.
5. Coloque el seguro lentamente en las ruedas para evitar daños.
6. El cable del control debe colocarse por el interior de los barandales.

Usos Inadecuados

1. No permitir más de una persona
2. No presione el freno con fuerza excesiva.
3. No accionar más de un botón a la vez.
4. No operar la cama cuando los barandales se encuentren abajo.
5. Desconecte el cable antes de mover la cama de un lado a otro.
6. No mover la cama utilizando el cable de alimentación o el control.

Solicita tu cotización